

INNO-LiPA HLA-A Update 早見表 ver 1.1

*** 注意事項**

1. 本早見表は、INNO-LiPA HLA-A Update のTyping Tableから、日本人頻度で0.01%以上のアレルが含まれる反応パターンを抜き出して簡略化したものです。
2. アレル頻度は、日本骨髄データバンクのデータを参考にしています。
3. 本キットは、抗原型を特定するキットであり、アレル型(4桁レベル)のタイピングを100%決定することはできません。
4. 日本人に0.01%以上のアレルは、太文字で示されています。
5. 本早見表を用いた結果は、必ずメーカーのTyping Table、解析ソフト(LiRAS HLA ver.6.0)で確認してください。

抗原型	アレル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44									
A1	A*01:01/04/09/+																																																					
A2	A*02:01/07/09/+																																																					
A203	A*02:03/148/230/+																																																					
A2	A*02:06/21/41/+																																																					
A210	A*02:10/244																																																					
A3	A*03:01/04/05/+																																																					
A3	A*03:02/10/65/+																																																					
A11	A*11:01/02/07/+																																																					
A24	A*24:02/11/20/+																																																					
A24	A*24:04/109																																																					
A24	A*24:08																																																					
A26	A*26:01/02/10/+																																																					
A26	A*26:03/06/21/+																																																					
A26	A*26:05																																																					
A29	A*29:01/12/15/+																																																					
A30	A*30:01/15/18/+																																																					
A30	A*30:04/06																																																					
A31	A*31:01/13/14/+																																																					
A32	A*32:01/12/14/+																																																					
A33	A*33:01/03/04/+																																																					

A*02:18 は、A*02:01/07/09/+ の反応パターンと同一です。

INNO-LiPA HLA-DRB1 Plus 早見表 ver 1.1

* 注意事項

1. 本早見表は、INNO-LiPA HLA-DRB1 Plus のTyping Tableから、日本人頻度で0.01%以上のアレルが含まれる反応パターンを抜き出して簡略化したものです。
2. アレル頻度は、日本骨髄データバンクのデータを参考にしています。
3. 本キットは、抗原型を特定するキットであり、アレル型(4桁レベル)のタイピングを100%決定することはできません。
4. 日本人に0.01%以上のアレルは、太文字で示されています。
5. 本早見表を用いた結果は、必ずメーカーのTyping Table、解析ソフト(LIRAS HLA ver.6.0)で確認してください。

抗原型	アレル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
DR1	DRB1*01:01/04/05/+			DRB1*01:01																	DRB1*01:01						DRB1*01:01											DRB1*01:01					
DR3	DRB1*03:01/05/14/+				DRB1*03:01						DRB1*03:01						DRB1*03:01											DRB1*03:01		DRB1*03:01								DRB1*03:01					
DR4	DRB1*04:01/13/21/+											DRB1*04:01																DRB1*04:01											DRB1*04:01				
DR4	DRB1*04:03/06/07/+															DRB1*04:03												DRB1*04:03											DRB1*04:03				
DR4	DRB1*04:04/08/19/+																					DRB1*04:04						DRB1*04:04											DRB1*04:04				
DR4	DRB1*04:05/10/29/+													DRB1*04:05								DRB1*04:05						DRB1*04:05											DRB1*04:05				
DR7	DRB1*07:01/03/04/+																		DRB1*07:01									DRB1*07:01												DRB1*07:01			
DR8	DRB1*08:02/04									DRB1*08:02													DRB1*08:02					DRB1*08:02												DRB1*08:02			
DR8	DRB1*08:03/10/23/+													DRB1*08:03										DRB1*08:03																DRB1*08:03			
DR8	DRB1*08:09																											DRB1*08:09		DRB1*08:09											DRB1*08:09		
DR9	DRB1*09:01/02/05/+															DRB1*09:01													DRB1*09:01												DRB1*09:01		
DR10	DRB1*10:01/02																			DRB1*10:01								DRB1*10:01												DRB1*10:01			
DR11	DRB1*11:01/04/12		DRB1*11:01								DRB1*11:01																	DRB1*11:01											DRB1*11:01				
DR12	DRB1*12:01/05/06/+	DRB1*12:01					DRB1*12:01			DRB1*12:01		DRB1*12:01										DRB1*12:01			DRB1*12:01			DRB1*12:01											DRB1*12:01				
DR12	DRB1*12:02/13/15/+	DRB1*12:02					DRB1*12:02			DRB1*12:02		DRB1*12:02										DRB1*12:02			DRB1*12:02			DRB1*12:02											DRB1*12:02				
DR13	DRB1*13:01/02/16/+																DRB1*13:01								DRB1*13:01			DRB1*13:01												DRB1*13:01			
DR13	DRB1*13:07																											DRB1*13:07												DRB1*13:07			
DR14	DRB1*14:02/06/47/+							DRB1*14:02									DRB1*14:02											DRB1*14:02												DRB1*14:02			
DR14	DRB1*14:03/12/98							DRB1*14:03									DRB1*14:03											DRB1*14:03												DRB1*14:03			
DR14	DRB1*14:05/08/23/+																DRB1*14:05											DRB1*14:05												DRB1*14:05			
DR14	DRB1*14:01/07/26/+					DRB1*14:01																						DRB1*14:01		DRB1*14:01											DRB1*14:01		
DR14	DRB1*14:29	DRB1*14:29						DRB1*14:29			DRB1*14:29						DRB1*14:29											DRB1*14:29												DRB1*14:29			
DR15	DRB1*15:01/02/03/+												DRB1*15:01																											DRB1*15:01			
DR16	DRB1*16:02/11/14																					DRB1*16:02																		DRB1*16:02			

DRB1*14:54 は、DRB1*14:01/07/26+ の反応パターンと同一です。

