







# INNO-LiPA HLA-DRB1 Plus 早見表 ver 1.1

\* 注意事項

1. 本早見表は、INNO-LiPA HLA-DRB1 Plus のTyping Tableから、日本人頻度で0.01%以上のアレルが含まれる反応パターンを抜き出して簡略化したものです。
2. アレル頻度は、日本骨髄データバンクのデータを参考にしています。
3. 本キットは、抗原型を特定するキットであり、アレル型(4桁レベル)のタイピングを100%決定することはできません。
4. 日本人に0.01%以上のアレルは、太文字で示されています。
5. 本早見表を用いた結果は、必ずメーカーのTyping Table、解析ソフト(LIRAS HLA ver.6.0)で確認してください。

抗原型	アレル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
DR1	DRB1*01:01/04/05/+			DRB1*01:01																	DRB1*01:01						DRB1*01:01											DRB1*01:01			
DR3	DRB1*03:01/05/14/+				DRB1*03:01					DRB1*03:01							DRB1*03:01											DRB1*03:01		DRB1*03:01								DRB1*03:01			
DR4	DRB1*04:01/13/21/+											DRB1*04:01																DRB1*04:01											DRB1*04:01		
DR4	DRB1*04:03/06/07/+															DRB1*04:03												DRB1*04:03											DRB1*04:03		
DR4	DRB1*04:04/08/19/+																					DRB1*04:04					DRB1*04:04												DRB1*04:04		
DR4	DRB1*04:05/10/29/+												DRB1*04:05									DRB1*04:05						DRB1*04:05											DRB1*04:05		
DR7	DRB1*07:01/03/04/+																		DRB1*07:01									DRB1*07:01													
DR8	DRB1*08:02/04									DRB1*08:02													DRB1*08:02					DRB1*08:02													
DR8	DRB1*08:03/10/23/+												DRB1*08:03											DRB1*08:03																	
DR8	DRB1*08:09																											DRB1*08:09													
DR9	DRB1*09:01/02/05/+															DRB1*09:01																									
DR10	DRB1*10:01/02																			DRB1*10:01								DRB1*10:01												DRB1*10:01	
DR11	DRB1*11:01/04/12		DRB1*11:01								DRB1*11:01																	DRB1*11:01											DRB1*11:01		
DR12	DRB1*12:01/05/06/+	DRB1*12:01					DRB1*12:01			DRB1*12:01		DRB1*12:01										DRB1*12:01			DRB1*12:01			DRB1*12:01													
DR12	DRB1*12:02/13/15/+	DRB1*12:02					DRB1*12:02			DRB1*12:02		DRB1*12:02																DRB1*12:02													
DR13	DRB1*13:01/02/16/+																																								
DR13	DRB1*13:07																																								
DR14	DRB1*14:02/06/47/+							DRB1*14:02																					DRB1*14:02												DRB1*14:02
DR14	DRB1*14:03/12/98							DRB1*14:03																					DRB1*14:03												DRB1*14:03
DR14	DRB1*14:05/08/23/+																																								
DR14	DRB1*14:01/07/26/+																																								
DR14	DRB1*14:29	DRB1*14:29																																							DRB1*14:29
DR15	DRB1*15:01/02/03/+												DRB1*15:01																												
DR16	DRB1*16:02/11/14																																								

DRB1\*14:54 は、DRB1\*14:01/07/26+ の反応パターンと同一です。

